

ANLEITUNG / INSTRUCTION

OP-Mund-Nasenschutz TYP IIR / Surgical masks TYPE IIR



Bevor Sie den Mund-Nasenschutz anwenden, waschen Sie sich bitte gründlich und die Hände mit Seife für mindestens 30 Sekunden. / Before using the surgical masks, please wash your hands with soap and water at least for 30 seconds.

1) Nehmen Sie die Maske aus der Verpackung und achten Sie darauf, dass der Nasenclip oben ist. Legen Sie nun die Ohrschlaufen hinter den Ohren an, sodass die Maske grob anliegt. / Take out the mask, turn nose clip side upwards, put ear loops behind your ears.

2) Drücken Sie nun mit Daumen und Zeigefinger den Nasenclip vom Nasenrücken bis zu den Nasenflügeln fest an, damit die Maske festen Halt bekommt und eng anliegt. / Use index finger and thumb to press nose clip from nose bridge to nose wing, pull the mask down to the jaw.

3) Ziehen Sie die Maske über Ihr Kinn, sodass diese nun Nase, Mund und Kinn vollständig bedeckt. / Adjust and make sure the mask covers your nose and jaw.

Achtung / Caution: Einwegmaske nur zum einmaligen Gebrauch. Wir empfehlen, die Maske nach mehrstündigem Gebrauch auszutauschen. Verwenden Sie sie keinesfalls wieder. Wenn Sie unter einer Krankheit leiden, suchen Sie bitte vor der Verwendung der Maske einen Arzt auf. Bitte entsorgen Sie gebrauchte Masken ordnungsgemäß. / Disposable mask for single use. We recommend to replace the mask after several hour of use. Do not re-use it. If you have any medical condition, please seek medical advice before use of mask. Please dispose used masks properly.